

CARSON[®] OCULENS[™]

OL-57

LUPAS PARA MONTURA DE ANTEOJOS CON CLIP /
5x30mm y 8x20mm

Instrucciones de uso:

Cambio de lupa

El conjunto OcuLens incluye una abrazadera y dos lupas intercambiables, con aumentos de 5x y 8x. Para cambiar de lupa, retírela de la abrazadera (Fig. 1) e inserte en su lugar la lupa deseada (Fig. 2).

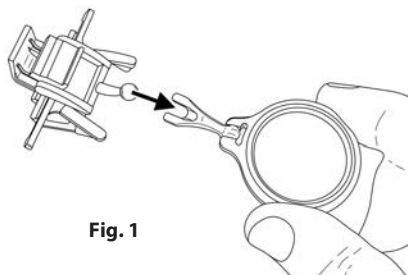


Fig. 1

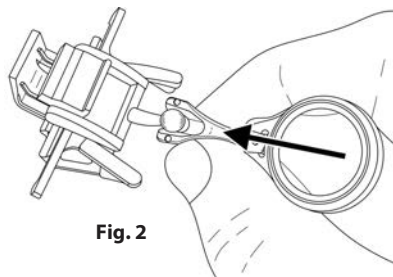


Fig. 2

Instalación en la montura de sus anteojos

Presione la parte central de la abrazadera para abrirla (Fig. 3). Coloque la pinza en el puente de sus lentes (Fig. 4) y suelte (Fig. 5).

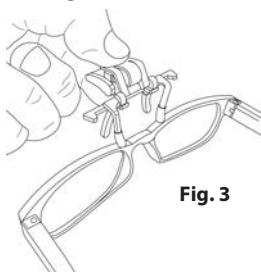


Fig. 3

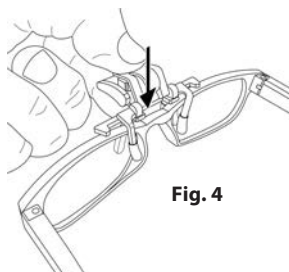


Fig. 4



Fig. 5

Uso de la lupa

Ubique la lupa frente a una de las lentes de sus anteojos (Fig. 6). Cuando no la necesite, gírela hacia arriba (Fig. 7). Cuando la OcuLens no esté en uso, guardarla la abrazadera y ambas lupas dentro de la bolsa protectora (Fig. 8).

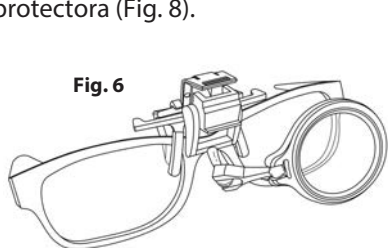


Fig. 6

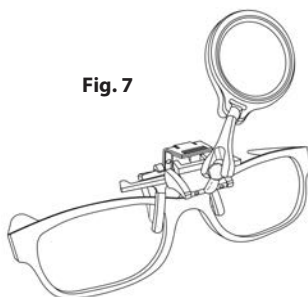


Fig. 7



Fig. 8

Limpieza de las lupas

Limpie las lupas con un paño de microfibra suave y limpio frotando suavemente con un movimiento circular. Si fuera necesario, humedezca el paño con agua. No use productos químicos, solventes o abrasivos porque pueden dañar la lente.

PRECAUCIÓN- RIESGO DE INCENDIO:

Mantenga las lupas lejos de los rayos directos del sol para evitar la posibilidad de un incendio accidental.

Servicio al Cliente:

En caso de cualquier dificultad, por favor contáctenos y encantados lo atenderemos.

En los EEUU

Fono: 1-631-963-5000

Email: info@carson.com

En el Reino Unido

Fono: +44 (0) 1938 557440

Email: uksupport@carson.com

En la Unión Europea

Fono: +44 (0) 1938 557440

Email: eusupport@carson.com

Para información sobre la garantía, visite www.carson.com/warranty